



ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО СНА

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

О TRELAX

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и поздравляем с покупкой одного из изделий TRELAX®!

Компания TRELAKC разрабатывает и выпускает ортопедические подушки и матрасы с 2005 года. С самого первого дня существования бренда мы делаем все возможное, чтобы следовать ключевым ценностям, положенным в его основу:

- высокая степень ответственности перед покупателями;
- экспертный подход и поиск инновационных решений;
- постоянное совершенствование качества изделий.

Изделия TRELAX® – медицинские ортопедические подушки и матрасы, предназначенные для лечения, реабилитации и профилактики заболеваний позвоночника, а также для улучшения качества сна у взрослых и детей.

TRELAX® завоевал репутацию бренда-эксперта в профессиональном сообществе. Эффективность и медицинские свойства изделий подтверждены клиническими испытаниями и удостоверениями Росздравнадзора РФ.

Каждое наше изделие создается при участии врачей-ортопедов, а технология производства допускает использование только безопасных и гипоаллергенных материалов.

Изделия TRELAX® аттестованы в Ростест по высшей категории качества и неоднократно становились победителями конкурсов: «100 лучших товаров России» и «Лучшее детям».



Вся продукция TRELAX® производится в соответствии с международным стандартом качества производства медицинских изделий ISO 13485:2011.

Каждый день мы подтверждаем высокий статус бренда TRELAX®, которому доверяют свое здоровье тысячи людей по всей стране.

В заключение хотелось бы еще раз поблагодарить Вас за оказанное доверие. Изделие TRELAX® обязательно принесет в Ваш дом дополнительный комфорт и послужит на благо Вашему здоровью и здоровью Ваших близких.

С наилучшими пожеланиями,


Генеральный директор ООО «ТРЕЛАКС»

Татьяна Максимова




ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА SPECTRA, П04



Профилактика сутулости и боли в спине.

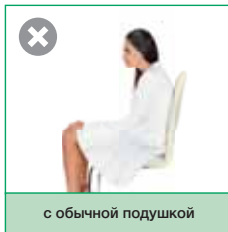

с обычной подушкой

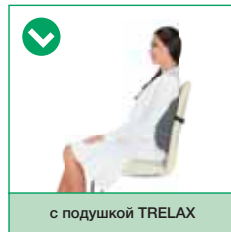

с подушкой TRELAX

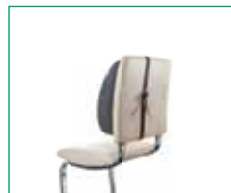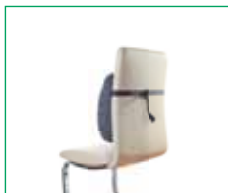

Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически правильного положения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время длительного сидения.
- Формирование правильной осанки.
- Нормализация тонуса паравертебральных мышц в поясничном отделе.
- Мягкая боковая поддержка в поясничном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время длительного сидения.
- Возникновение болей в нижней части спины при остеохондрозе.
- Остеохондроз нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника.
- Нарушение осанки.
- Реабилитация при комплексной терапии, после травм и заболеваний нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника в качестве реклинатора на период постельного режима.
- Улучшение эргономики рабочего кресла.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. При нестабильности позвонков в поясничном отделе перед применением подушки необходимо проконсультироваться с врачом.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 37х33х9 см.

Цвет:

Серый, черный.

Состав:


Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.
Чехол: 100% полиэстер.

Комплектность:

Подушка, съемный чехол с ремнем для фиксации, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

Съемный чехол из микрофибры

Высокоэластичный пенополиуретан, насыщенный ионами серебра

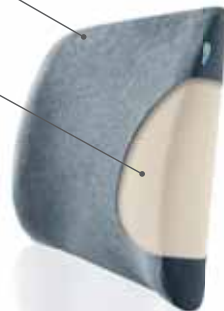

Способ применения:

Подушку размещают на кресле или сиденье так, чтобы максимальный выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника. Для крепления к спинке стула или кресла на подушке имеется фиксирующий ремень, который может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

AUTOBACK, арт. П12
CRUISE, арт. П36
OPTIMA, арт. П01
RESPECTA, арт. П05
RESPECTA BABY, арт. П35
SOLA, арт. П30
SPECTRA, арт. П04
SPECTRA SEAT, арт. П17
AUTOHEAD, арт. П16

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 30°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Не применять сушку в барабане. Утюжка при температуре не более 110°C.

Уход за заготовкой подушки: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

MIMI, арт. П27
PRIMA, арт. П28
CLIN, арт. П31
FANTASY, арт. ПФ208

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Сушка в естественных условиях. Утюжка при температуре 110°C.

Уход за основной подушек и матрасов: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

ORTHOFIX, арт. П15
ROLLER, арт. ПФ209

Уход за чехлом:



Чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 30°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Не применять сушку в барабане. Утюжка запрещена.

BANANA, арт. П33

Уход за чехлом:



Наволочку отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Сушка в естественных условиях. Утюжка при температуре 110°C.

Уход за подушкой в чехле:



Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C. Осторожно отжать руками, не выкручивать. Рекомендуется естественная вертикальная сушка. Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Утюжка запрещена.

BABY COMFORT, арт. П10
NANNY, арт. П29

Уход за подушкой:



Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C. Для предотвращения повреждения материала контактной лентой рекомендуется каждую деталь подушки-конструктора стирать отдельно. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Выжимать руками, не выкручивать. Сушка естественная, горизонтальная, в расправленном виде. При необходимости возможна утюжка с отпариванием при максимальной температуре утюга 110°C. После отпаривания желательно просушить детали подушки-конструктора в течение 1 часа.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

DIVA, арт. П08

Уход за изделием:



Подушку можно подвергать машинной стирке при температуре 40°C (деликатный режим). Рекомендуется естественная сушка в вертикальном состоянии. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Утюжка запрещена.

MEDICA, арт. П06

Уход за наволочкой:



Наволочку, отдельно от подушки можно подвергать машинной стирке при температуре 95°C. Автоклавирование при температуре 130°C. Допускается машинная сушка при температуре до 120°C. Сушка в камере при температуре до 105°C (не более 1 мин.). Не обрабатывать препаратами, содержащими хлор и альдегиды. Утюжка запрещена.

Уход за заготовкой подушки: пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

арт. М80/190
арт. М110/190
арт. М140/190
арт. М160/190
арт. МА50/100 «Классик»
арт. МА50/110 «Люкс»,
а также матрасы
нестандартных размеров

Уход за матрасами:



Матрасы не рекомендуется стирать в домашних условиях в связи с долгой сушкой. Для стирки матрасов необходимо использовать профессиональную мокрую чистку (аквачистка). Рекомендуется деликатный режим чистки. Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Утюжка запрещена.

МАТРАЦ с эффектом
памяти формы, арт. М2П
Наволочки

Чехлы на матрасы

Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от изделия, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 30°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Не применять сушку в барабане. Утюжка при температуре не более 110°C.

Уход за основой матраса: пенополиуретан боится воды. Основу матраса нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите основу. Протрите хорошо отжатой тряпкой. При необходимости используйте дополнительный чехол из водоталкивающей ткани, который прилагается к матрасу.

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

арт. МД60/120
арт. МД40/80

Уход за детскими матрасами:



Допускается ручная стирка при температуре воды не более 40°C. Естественная вертикальная сушка без отжима. Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Утюжка запрещена.

THERMO CONTROL

арт. ОТ140x205
арт. ОТ172x205
арт. ОТ200x220

Уход за одеялом:



Одеяло можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим) при достаточном размере барабана. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Возможна сушка в барабане при низкой температуре. Утюжка при температуре не более 110°C. Для стирки вне дома необходимо использовать профессиональную мокрую чистку (аквачистка). Рекомендуется деликатный режим чистки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

OPTIMA, арт. П01
RESPECTA, арт. П05
RESPECTA BABY, арт. П35
SOLA, арт. П30
FANTASY, арт. ПФ208

Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов.

В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

MIMI, арт. П27
PRIMA, арт. П28
ORTHOFX, арт. П15
ROLLER, арт. ПФ209

Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-18 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов.

В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

BANANA, арт. П33
DIVA, арт. П08

Гарантийный срок на подушку – 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Во время эксплуатации возможно проминание шариков пенополистирола на 25-30% от исходного объема в местах повышенной нагрузки.

Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи.

BABY COMFORT, арт. П10
CLIN, арт. П31
NANNY, арт. П29

Гарантийный срок: 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении, использовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов.

В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Для предотвращения деформации деталей подушки их нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

AUTOBACK, арт. П12
SPECTRA, арт. П04
SPECTRA SEAT, арт. П17

Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки.

В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать согласно инструкции, не скручивать, не складывать.

В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи.

THERMO CONTROL,
арт. OT140x205
арт. OT172x205
арт. OT200x220

Гарантийный срок на одеяло: 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства одеяла.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке изделия в соответствии с инструкцией.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

MEDICA, арт. П06

Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Гарантийные условия распространяются в случае использования подушки пациентами весом не более 120 кг. Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в местах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты валика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика.

Для предотвращения деформации подушку нужно использовать на ровной поверхности, не скручивать, не складывать. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C.

Гарантия действительна только при использовании и хранении продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

CRUISE, арт. П36

RESPECTA COMPACT,
арт. П07

AUTOHEAD, арт. П16

Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Не допускается длительное хранение подушки в скрученном виде в связи с возможной деформацией.

Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении и использовании. Храните подушку вдали от источников сильного запаха. В случае выявления запаха необходимо проверить подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий.

Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C. При кратковременном хранении изделия в холодных условиях нарушается эластичность пенополиуретана, поэтому перед использованием подушки необходимо позволить ей нагреться до комнатной температуры.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Перед началом использования изделия необходимо снять с подушки наволочку и постирать ее.

МАТРАЦЫ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

арт. М80/190, арт. М110/190,
арт. М140/190, арт. М160/190,
арт. МД60/120, арт. МД40/80,
арт. МА50/100 «Классик»

арт. МА50/110 «Люкс»,
а также матрасы
нестандартных размеров

Гарантийный срок на матрас: 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства матраса.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

В случае выявления специфического запаха при вскрытии упаковки необходимо проветрить матрас на свежем воздухе.

Матрас необходимо встряхивать не менее 1 раза в неделю для восстановления шариков. Периодическое встряхивание позволяет шарикам пенополистирола восстановиться, но не более чем на 90% от первоначального размера.

В период использования матрас может просесть в местах наибольшей нагрузки, общий объем шариков уменьшается. При этом шарик продолжает выполнять свою функцию.

При весе пользователя более 120 кг, срок службы матраса сократится.

При эксплуатации матрас может увеличиться по длине на 3-4 см.

МАТРАЦ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

арт. М2П

Гарантийный срок на матрас: 10 лет со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства матраса.

Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

Гарантия не покрывает естественные изменения и особенности конструкции матраса и материалов в плотности, жесткости или особенности, которые не влияют на функциональные свойства.

Гарантия покрывает возможное снижение высоты в местах повышенной нагрузки во время эксплуатации. Допускается остаточное уменьшение высоты до 10 мм относительно краев матраса.

Гарантия покрывает дефект пенополиуретана в виде воздушных включений площадью более 2 см².

Подробнее смотрите в гарантийном талоне, приложенном к матрасу.

Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.

Гарантия на водонепроницаемый чехол: 1 месяц со дня продажи, но не более 7 циклов стирки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.

Соблюдения мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителей и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подушка ортопедическая TRELAX под спину, арт. П12, **AUTOBACK**
Подушка ортопедическая TRELAX под голову на автомобильное сиденье, арт. П16, **AUTOHEAD**
Подушка-конструктор ортопедическая TRELAX для детей, арт. П10, **BABY COMFORT**
Подушка ортопедическая TRELAX для отдыха и путешествий, арт. П08, **DIVA**
Подушка ортопедическая TRELAX с отверстием на сиденье, арт. П06, **MEDICA**
Подушка ортопедическая TRELAX под голову, арт. П01, **OPTIMA**
Подушка ортопедическая TRELAX с эффектом памяти под голову, арт. П05, **RESPECTA**
Подушка ортопедическая TRELAX с эффектом памяти под голову для путешествий, арт. П07, **RESPECTA COMPACT**
Подушка ортопедическая TRELAX под спину, арт. П04, **SPECTRA**
Подушка ортопедическая TRELAX с откосом на сиденье, арт. П17, **SPECTRA SEAT**
Подушка ортопедическая TRELAX фиксирующая, арт. П15, **ORTHOFIX**

TU № 9396-003-88419706-2008, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
Товар является медицинским изделием. Регистрационное удостоверение № ФОР 2009/04606 от 26.06.2015 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ12.Д01635 (с 23.03.2015 г. по 22.03.2020 г.) выдана ОАО «ВНИИС».



Подушка ортопедическая TRELAX для кормления грудью, арт. П29, **NANNY**
Подушка ортопедическая TRELAX трансформер для беременных и младенцев, арт. П31, **CLIN**
Подушка ортопедическая TRELAX для беременных и кормящих мам, арт. П33, **BANANA**
Подушка ортопедическая TRELAX с эффектом памяти для отдыха и путешествий, арт. П36, **CRUISE**
Подушка ортопедическая TRELAX с эффектом памяти под голову для детей от 1 до 18 месяцев, арт. П27, **MIMI**
Подушка ортопедическая TRELAX с эффектом памяти под голову для детей от 1,5 до 3-х лет, арт. П28, **PRIMA**
Подушка ортопедическая TRELAX с эффектом памяти под голову для детей от 3-х лет, арт. П35, **RESPECTA BABY**
Подушка ортопедическая TRELAX с эффектом памяти под голову, арт. П30, **SOLA**
Подушка ортопедическая TRELAX, арт. ПФ209 валик, **ROLLER**
Подушка ортопедическая TRELAX, арт. ПФ208 под спину, **FANTASY**

TU № 9396-010-88419706-2014
Товар является медицинским изделием. Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3829 от 29.03.2016 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.АД37.В.08478/19 (с 06.03.2019 г. по 05.03.2022 г.) выдана «Красно Дар» ООО «ИД Контроль».



Матрац ортопедический с эффектом памяти формы, двухслойный, арт. M2F

TU № 9396-011-88419706-2014
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3873 от 04.04.2016 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.АД37.В.13362/19 (с 13.06.2019 г. по 12.06.2022 г.) выдана «Красно Дар» ООО «ИД Контроль».



Матрац ортопедический TRELAX односпальный, арт. M80/190
Матрац ортопедический TRELAX полуторный, арт. M110/190
Матрац ортопедический TRELAX двуспальный, арт. M140/190
Матрац ортопедический TRELAX двуспальный, арт. M160/190
Матрац ортопедический в детскую кроватку, арт. МД60/120
Матрац ортопедический в детскую коляску, арт. МД40/80
Матрац ортопедический TRELAX на автомобильное сиденье, арт. МА50/100 «Классик»
Матрац ортопедический TRELAX на автомобильное сиденье, арт. МА50/110 «Люкс»

TU № 9396-002-88419706-2008, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
Товар является медицинским изделием. Регистрационное удостоверение № ФОР 2009/04590 от 16.03.2015 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ12.Д01634 (с 23.03.2015 г. по 22.03.2020 г.) выдана ОАО «ВНИИС». Патент № 102887 • Патент № 55579



Аксессуары
Дополнительные наволочки на подушки и чехлы на матрасы

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.АМ04.В.01025/19 (с 29.08.2019 г. по 28.08.2022 г.) выдан ООО «ВОСТОК-ЗАПАД».
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.АМ04.В.01023/19 (с 29.08.2019 г. по 28.08.2022 г.)
Декларация о соответствии TC № RU Д-РУ.АС11.В.01072 (с 08.04.2015 г. по 08.04.2020 г.) выдана ООО «Полисерт-консалт».



Одеяло TRELAX с терморегулирующими вставками, **THERMO CONTROL**

TU 8547-012-88419706-2016
Декларация о соответствии TC N RU Д-РУ.АЮ85.В.14820 (с 10.11.2016 г. по 09.11.2021 г.) выдана АНО «ЭКСИМТЕСТ».



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ТРЕЛАКС»
123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4
www.trelax.ru, www.trelax.ru



Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ЕСС.СК.0061, удостоверяющий систему менеджмента качества применительно к разработке, производству и реализации ортопедических изделий. Соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485:2011 «Издания медицинские. Система менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования».
Дата выдачи: 19.08.2014. Дата прохождения инспекционного контроля 19.08.2015, 19.08.2016, 17.08.2017



Аттестат высшей категории качества, выдан российским центром испытаний и сертификации РОСТЕСТ МОСКВА
№ 02-04-017 от 05.11.2015 г.
№ 02-04-018 от 05.11.2015 г.
№ 02-04-021 от 05.11.2015 г.
№ 02-04-022 от 05.11.2015 г.



www.trelax.ru, www.трелакс.рф

Арт.: NTTC-all-N11_12/19