



ORTMANN®

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ГЕЛЕВО-ТКАНЕВЫЙ
БУРСОПРОТЕКТОР
(ЗАЩИЩАЮЩИЙ)

ALTIS
Gel

Арт. F-00042-07В



При постоянном использовании прокладка ALTIS эффективно помогает устранить болевые ощущения и дискомфорт в «косточках» (плюснефаланговые суставы больших пальцев) при потертостях, деформациях, ушибах и воспалениях на фоне Hallux valgus, а так же при подагре, отложении солей, артрозе и воспалении локви сустава.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- начальная степень Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружи);
- артрозо-артриты и бурситы первого плюснефалангового сустава;
- мозоли и натоптыши в области первого плюснефалангового сустава;
- подагра;
- послеоперационный период;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

надевается пальцем на первый палец гелевой поверхностью к ноге и располагается в области первого плюснефалангового сустава. Прокладка ALTIS удобно крепится на большом пальце, предназначена для многократного применения и идеально подходит для чувствительной лони. Надев прокладку ALTIS, можно ходить во всех типах обуви.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- защита от давления и трения воспаленной суставной сумки первого плюснефалангового сустава;
- защита от контакта с обувью;
- эффективное смягчение лони в области контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и мокнущих ранах.

СОСТАВ:

гелевая пластина, покрытая с внешней стороны тканью. Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют лону и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:

бурсопротектор ежедневно моют теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего головную поверхность припудривают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:

универсальный.



ORTMANN®

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

утилизация с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выделены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Соблюдения мер безопасности не требуется. Отпускается без рецепта.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

СРОК ГОДНОСТИ:

не установлен.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.



Товар является медицинским изделием. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09970 от 21.06.2011 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01711 (с 27.06.2014 г. по 26.06.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИ-МАШ».

Изготовитель: «ФРЕСНО ИНТЕРНЕШНЛ 2006, С.А.», Испания, Тейа (Барселона), Локал 13 08329, Полигано Индастриал Бувида, Индастриа 4.

Импортер: ООО «Орто Медикал Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Нрязногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИНАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skil@nkamed.ru.