



ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО СНА

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАБОТА О БУДУЩИХ МАМАХ И ДЕТЯХ

Ожидание и рождение малыша – одно из самых удивительных и значимых событий в жизни женщины. Очень важно, чтобы будущая мама высыпалась и чувствовала себя хорошо. Полноценный и комфортный сон в этот период – залог здоровья мамы и ребенка.

Ортопедические подушки для беременных женщин и кормящих мам помогают выбрать максимально удобную позу и разгрузить позвоночник, снять усталость и напряжение в спине, а также помочь маме в уходе за ребенком.



Детские ортопедические подушки Trelax создают правильные условия для развития позвоночника, надежно и комфортно поддерживая голову и шею ребенка в физиологически правильном положении. Подушки изготовлены из безопасных гипоаллергенных материалов, а также обладают перфорацией для лучшего воздухообмена и предотвращения удушья.

Положение головы во время сна и отдыха



с обычной подушкой



с подушкой **TRELAX**

- Подушки для грудничков служат для профилактики развития асимметрии головы, за счет перераспределения давления и снятия нагрузки.
- Подушки для детей от 1,5 до 8 лет имеют два разных по высоте валика для оптимального подбора. Подушка способствует формированию осанки, снятию избыточного напряжения мышц и улучшению качества сна. А также используется в комплексе лечения после операций и при травмах позвоночника.

Ортопедические подушки и матрасы – вклад в будущее здоровье Вашего малыша.



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Оказываемые эффекты:

- Фиксация для физиологически правильного положения позвоночника во время сна и отдыха при беременности.
- Расслабление мышц ног, улучшение кровообращения и снятие отечности.
- Устранение напряжения с пояса верхних конечностей, грудного отдела позвоночника и шеи при кормлении грудью.
- Нормализация тонуса в мышцах шеи и плечевого пояса.
- Фиксация позвоночника ребенка в физиологически правильном положении при кормлении.
- Улучшение качества сна.

Показания к применению:

- Обеспечение комфортного положения тела, поясницы, ног, живота в положении лежа или сидя в период беременности.
- Снятие напряжения с пояса верхних конечностей, грудного отдела позвоночника и шеи во время кормления ребенка.
- Надежная фиксация ребенка во время грудного кормления, периода бодрствования и самостоятельного питания из бутылочки.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 26x135 см.

Состав:

Наполнитель: 100% пенополистирол (полимерные шарики).
Внутренний чехол: 100% хлопок. Наволочка: 100% хлопок.

Комплектность:

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовая сумка, инструкция по применению. Пакет с наполнителем для дополнительной набивки подушки при потере желаемого объема. **Способ дополнительной набивки:** снимите верхнюю наволочку, расстегните молнию на внутреннем чехле и аккуратно добавьте наполнитель. Плотнo застегните молнию. Внимание! Наполнитель использовать только по назначению. Берегите от детей!

Дополнительную наволочку можно приобрести отдельно.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА

для беременных и кормящих мам, арт. ПЗЗ

- ☞ РАЗГРУЗКА ПОЯСНИЦЫ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ☞ ПОДДЕРЖКА ЖИВОТА ДЛЯ КОМФОРТНОГО СНА И ОТДЫХА
- ☞ УДОБСТВО ПРИ КОРМЛЕНИИ РЕБЕНКА ГРУДЬЮ ИЛИ ИЗ БУТЫЛОЧКИ



Способ применения:

Расположение подушки во время беременности



Расположение подушки во время кормления, укачивания и сна младенца



Расположение подушки для фиксации ребенка



ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

BANANA, арт. П33

Уход за чехлом:



Наволочку отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40°C (деликатный режим). Не использовать отбеливатели и органические растворители. Сушка в естественных условиях. Утюжка при температуре 110°C.

Уход за подушкой в чехле:



Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40°C. Осторожно отжать руками, не выкручивать. Рекомендуется естественная вертикальная сушка. Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Утюжка запрещена.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

BANANA, арт. П33

DIVA, арт. П08

Гарантийный срок на подушку – 1 год со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. Во время эксплуатации возможно проминание шариков пенополистирола на 25-30% от исходного объема в местах повышенной нагрузки.

Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ для всех изделий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ: Вместе с бытовым мусором.

Соблюдения мер безопасности не требуется.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Срок годности не установлен.

Отпускается без рецепта.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.