

Механизм действия градуированной компрессии

- Улучшение работы мышечно-венозной помпы плеча и предплечья.
- Уменьшение патологической венозной емкости верхней конечности.
- Уменьшение диаметра вен, улучшение работы венозных клапанов, улучшение венозного кровотока.
- Повышение тканевого давления, уменьшение объема интерстициальной жидкости, уменьшение отека.
- Улучшение реологических свойств крови.
- Улучшение скорости лимфотока.

Показания к применению

- Вторичная лимфедема:
 - после мастэктомии и лучевой терапии;
 - после травм и ожогов, воспалительных процессов, приводящих к поражению лимфатических сосудов;
 - при длительном ограничении подвижности конечностей;
 - при парезах и плегиях.
- Первичная лимфедема: врожденные аномалии развития лимфатической системы.
- Хронические заболевания вен, тромбофлебиты и тромбозы вен плеча и предплечья, включая постинфекционные осложнения.
- Компрессионная терапия после склеротерапии и хирургических вмешательств на поверхностных венах рук.

Противопоказания и меры предосторожности

Медицинские противоотечные изделия для верхних конечностей следует применять только после консультации с врачом в следующих случаях:

- дерматиты различного происхождения;
- нарушение артериального кровообращения рук (энтертериит, атеросклероз, диабет);
- мокнущая экзема;
- острая инфекция мягких тканей рук;
- метаболические отеки;
- сердечно-легочная недостаточность в стадии декомпенсации.

Артикул	Вид изделия	Состав
2L500	Рукав на силиконовой резинке	70% полиамид, 30% эластан (лайкра)
2L501	Рукав на силиконовой резинке с захватом большого пальца	70% полиамид, 30% эластан (лайкра)
2P508	Рукав на лямке	70% полиамид, 30% эластан (лайкра)
2P609	Перчатка	22% хлопок, 47% полиамид, 31% эластан (лайкра)
2L600	Перчатка	22% хлопок, 47% полиамид, 31% эластан (лайкра)

Правила надевания

Для облегчения надевания изделия рекомендуется припудрить руку тальком или детской присыпкой. Для правильного распределения давления рукав должен быть равномерно распределен по всей длине руки. Следует обязательно расправить складки, чтобы избежать трения и раздражения кожи. Запрещается закатывать края изделия валиком, так как это может вызвать эффект «эластичного жгута» и привести к застою лимфы и венозной крови ниже перетяжки. Правильно подобранное по размеру изделие плотно прилегает к телу, но не нарушает кровообращение в кисти и не вызывает болезненных ощущений. Рукав, свободно надетый на руку, не обеспечивает лечебного эффекта.

Обратите внимание!

- Длинные ногти, заусенцы на руках могут повредить изделие, поэтому ногти на руках должны быть обработаны.
- Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить изделие, поэтому перед надеванием и при стирке их нужно снимать.
- Сняв рукав, нужно вымыть руку по всей длине и, по возможности, обработать увлажняющим кремом.
- Если во время ношения изделия беспокоят боль, отёк или ощущение онемения пальцев руки или изменение цвета кисти, то следует обязательно проконсультироваться с врачом.
- Разрешено использование кремов и мазей совместно с ношением изделия. При этом необходимо учитывать, что использование мазей и кремов может повлиять на структуру ткани изделия и привести к снижению прочности изделия. А также крема и мази могут привести к снижению фиксации силиконовой резинки к коже.

VENOTEKS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LYMPHO

LYMPHO

LYMPHO

LYMPHO

LYMPHO


LYMPHO

LYMPHO

LYMPHO

LYMPHO

LYMPHO

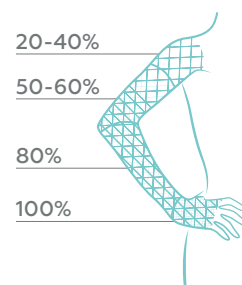

Особенности изделий VENOTEKS LYMPHO


- Градуированная компрессия с максимальной компрессией 23-32 мм рт.ст. в области запястья.
- Высокая лечебная эффективность за счёт физиологически правильного, градуированного распределения давления по конечности (см. рисунок).
- Современная технология круговой уплотненной вязки рукава обеспечивает стабильную удерживающую форму.
- Высокая эластичность изделий обеспечивается за счёт использования LYCRA®.
- Наличие микрофибры придаёт ткани ощущение мягкости и комфорта, обеспечивает воздухо- и влагообмен.
- Перчатка с внутренним слоем из 100% хлопка подходит для пациентов с чувствительной кожей.
- Модели рукавов с резинкой с капельным силиконом надёжно фиксируются на руке.
- Модели рукавов на лямке имеют наплечник и удобную фиксацию на застёжку велкро.
- Телесный цвет практичен при ежедневном использовании изделия.

Правила подбора размера рукава

Размер рукава подбирают по измерениям, указанным в таблице подбора размера. Все измерения необходимо проводить в утреннее время. Если ваши измерения не соответствуют значениям в таблице, не используйте такое изделие.

Размер рукава	1	2	3	4	5	6	7
Измерение окружности (см)							
cG	19-25	22-29	25-32	29-36	33-40	37-44	41-48
cE	17-22	20-26	23-29	26-32	29-35	32-38	35-41
cD	16-21	20-24	23-27	26-30	28-33	31-36	34-39
cC	12-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
cA	15-18	16.5-19	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29

Длина	Укороченная	Стандартная
IG	менее 44 см	более 44 см

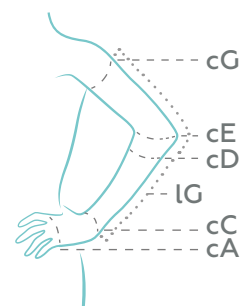

Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, Potsdamer Strasse 92, 10785 Berlin, Germany.
Место производства: Varimed Medical San. Tic. Ltd. STI, Ciftelhavuzlar Cad. No:28 Terazidere Mah, Bayrampasa/Istanbul. Istanbul (Euro Side) 34035, Turkey.
Импортер/уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.
Товар является медицинским изделием.



www.lycra.com
LYCRA® is a trademark of The LYCRA Company

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Изделия компрессионные для нижних и верхних конечностей в наборах и отдельных упаковках: перчатка, рукав. Упаковка содержит изделие, артикул и характеристики которого указаны на наклейке со штрих-кодом.

VENOTEKS


МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ПРОТИВООТЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

LYMPHO



- Высокая эффективность
- Надежная фиксация на руке
- Комфортный материал
- Бежевый цвет

Перчатка | Рукав | Рукав с перчаткой | Рукав с перчаткой и лямкой

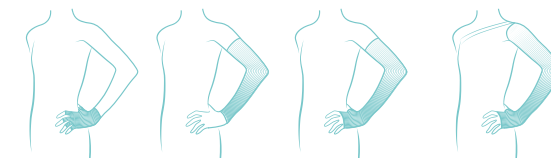

Арт.: TVEN-LYM-N3_06/22

Правила подбора размера перчатки

Размер перчатки подбирают по измерениям, указанным в таблице подбора размера с учетом измерений кисти руки и пальцев. Все измерения необходимо проводить в утреннее время. Если ваши измерения не соответствуют значениям в таблицах, не используйте такое изделие

Размер перчатки	1	2	3	4	5	6	7
Измерения ладони (см)							
cC	12-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
cB	15,5-19	17-20	18,5-22	20,5-24	22,5-26	24,5-28	26,5-30
cA	15-18	16,5-19	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29
IAB	3-5 см						
IAC	9-12 см						



Размер перчатки		1	2	3	4	5	6	7
Измерения пальцев (см)								
Большой палец	IZ	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0
	IX	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
	XZ	3,5-4,5						
Указательный палец	IZ	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,5
	IX	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	XZ	4,5-5,5						
Средний палец	IZ	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,5
	IX	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	XZ	5,5-6,5						
Безымянный палец	IZ	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0
	IX	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0
	XZ	4,5-5,5						
Мизинец	IX	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,5
	IZ	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,5
	XZ	3,5-4,5						

СХЕМА НАДЕВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ



Режим и правила использования

Режим использования противоотечных рукавов и перчаток может быть как краткосрочным, так и более длительным. Это зависит от текущих медицинских показаний, а также от сопутствующих хронических заболеваний, абсолютных и относительных противопоказаний и т.д. Чтобы учесть все Ваши индивидуальные особенности и провести максимально эффективное лечение, рекомендуем перед применением проконсультироваться с лечащим врачом.

Правила ухода

Рекомендуется стирать вручную ежедневно. Температура воды не должна превышать 30°C. В качестве моющих средств лучше использовать жидкие слабощелочные шампуни. После стирки изделие следует хорошо прополоскать в теплой воде, завернуть в полотенце и слегка отжать. Сушить в прохладном месте на сухом полотенце.

Обратите внимание!

Запрещены: отбеливание, химчистка, утюжка, сушка на нагревательных приборах. Не следует тянуть и обрезать технологические концы нитей внутри изделия.

Гарантийными случаями не являются:

- Механические повреждения (включая случайные).
- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.
- Дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием.
- Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Информация для покупателей:

Сохраните кассовый чек и упаковку изделия после покупки.

Индивидуальные параметры покупателя: _____

К внешнему виду и подбору размера изделия претензий не имею.

Подпись покупателя _____ Дата покупки _____

Внимание!

Для рассмотрения претензий к приобретенным изделиям Вам необходимо предоставить по месту покупки изделие в чистом виде, оригинал кассового чека, данную упаковку изделия.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Условия хранения: изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухом месте, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли. **Комплектность:** компрессионное изделие, инструкция. **Утилизация:** с бытовым мусором.

