



**ORTMANN®**

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## КРУГЛЫЕ ГЕЛЕВЫЕ ВСТАВКИ (КОРРИГИРУЮЩИЕ)

# INTON Gel

Арт. 00054-01В; 02В



Мягкие и комфортные межпальцевые вставки INTON изготовлены из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании гелевые вставки INTON помогают быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в межпальцевых промежутках при мозолях, потертостях, деформациях, лечении ушибов и воспалений суставов пальцев ног. Вставки INTON предназначены для многократного применения и идеально подходят для чувствительной кожи.

### НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Hallux valgus (отклонение большого пальца стопы наружу);
- мозоли в проекции межфаланговых суставов;
- молоткообразные пальцы;
- трещины;
- потертости;
- повреждения кожи пальцев стопы;
- вросшие ногти;
- состояния после операции по поводу Hallux valgus.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

идеально размещает между пальцами стоп (чаще вкладывается между первым и вторым пальцами). Более широкая часть должна располагаться с подошвенной стороны стопы.

### ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- разделяют прижатые друг к другу пальцы;
- предотвращают трение, потертости, мозоли;
- минеральное масло в составе геля TRIBLOCK эффективно смягчает кожу.

### ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и мокнущих ранах.

### СОСТАВ:

гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют размягчению мозолей.

### УХОД:

вставки ежедневно мыть теплой водой с детским мылом, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего припудривать тальком или детской присыпкой.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

2 шт. в упаковке.

### РАЗМЕР:

S, L.



# ORTMANN®

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

утилизация с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выделены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Соблюдения мер безопасности не требуется. Отпускается без рецепта.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## СРОК ГОДНОСТИ:

не установлен.

## ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.



Товар является медицинским изделием. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09970 от 21.06.2011 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01711 (с 27.06.2014 г. по 26.06.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИ-МАШ».

**Изготовитель:** «ФРЕСНО ИНТЕРНЕШНЛ 2006, С.А.», Испания, Тейа (Барселона), Локал 13 08329, Полигано Индастриал Бувида, Индастриа 4.

**Импортер:** ООО «Орто Медикал Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Нрасногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИИНАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: [skil@nkamed.ru](mailto:skil@nkamed.ru).