



ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО СНА

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ И МАТРАЦЫ



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ И РАБОТАТЬ С КОМФОРТОМ?

Значительную часть нашей жизни мы проводим сидя, будь то работа, путешествия или поездки в автомобиле. При длительном сидении ощущается дискомфорт и напряжение, возникает усталость, боли в спине.

Ортопедические подушки и матрасы TRELAX заботятся о комфорте на работе и дома, в путешествиях и во время вождения автомобиля.

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Расслабляют мышцы шеи, служат для профилактики головной боли, помогают легче перенести длительные поездки.

### Положение головы во время сна и отдыха



БЕЗ подушки



с подушкой TRELAX®

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Поддерживают шейный отдел и поясницу во время вождения. Снижают утомляемость за рулем при режиме движения "старт-стоп" в городских пробках, а также на долгих дистанциях. Помогают снять мышечное напряжение, превращают любое автомобильное кресло в эргономическое.

### Положение спины при сидении в автокресле



БЕЗ подушки



с подушкой TRELAX®

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ ДЛЯ РАБОТЫ И ДОМА

Оказывают поддержку позвоночника, снимают напряжение при длительной статической нагрузке, помогают сформировать правильную мышечную память и значительно улучшить осанку.

### Положение спины при сидении на стуле



БЕЗ подушки



с подушкой TRELAX®

## ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА

под спину, арт. П12

- ☉ ПРОФИЛАКТИКА УСТАЛОСТИ И БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ
- ☉ НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА СПИНЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДКАХ
- ☉ ЭРГОНОМИЧНЫЙ КОМФОРТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА



Изделие используется преимущественно в профилактических целях. При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

### Оказываемые эффекты:

- Обеспечение физиологически правильного положения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время длительного сидения.
- Формирование правильной осанки.
- Нормализация тонуса паравертебральных мышц в поясничном отделе.
- Снижение вибрационного воздействия на позвоночник.

### Показания к применению:

- Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время вождения.
- Профилактика возникновения болей в нижней части спины при остеохондрозе.
- Мышечный дисбаланс и боли в пояснице.
- Улучшение эргономики автомобильного кресла.

### Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

### Способ применения:

Подушку размещают на кресле так, чтобы максимальный выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника. Для крепления к спинке кресла имеются два фиксирующих эластичных ремня.

### Подбор размера:

Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора. 25x29x6 см.

### Цвет:

Серый, черный.

### Состав:

Основа: эластичный пенополиуретан с ионами серебра.

Чехол: 100% полиэстер.

Чехол из ткани  
3D mesh

Высокоэластичный  
пенополиуретан,  
обеспечивающий  
мягкую и надежную  
поддержку



### Комплектность:

Подушка, съемный чехол с ремнями для фиксации, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению.

### Положение спины при сидении в автокресле



БЕЗ ПОДУШКИ



с подушкой **TRELAX®**

### Варианты крепления подушки к спинке автокресла



# ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

AUTOBACK, арт. П12  
CRUISE, арт. П36  
OPTIMA, арт. П01  
OPTIMA BABY, арт. П03  
RESPECTA, арт. П05  
RESPECTA BABY, арт. П35  
SOLA, арт. П30  
SPECTRA, арт. П04  
SPECTRA SEAT, арт. П17  
AUTOHEAD, арт. П16

## Уход за наволочкой и чехлом:



Наволочку и чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 30°C (деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону. Не использовать отбеливатели и органические растворители. Не применять сушку в барабане. Утюжка при температуре не более 110°C.

**Уход за заготовкой подушки:** пенополиуретан нельзя стирать. Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку. При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

AUTOBACK, арт. П12  
SPECTRA, арт. П04  
SPECTRA SEAT, арт. П17

## Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи.

Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства подушки. В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель. Для предотвращения деформации подушку нужно использовать согласно инструкции, не скручивать, не складывать. В пенополиуретане допустимы воздушные включения в виде небольших отверстий. Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0°C. Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с инструкцией.

**Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи.**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
для всех изделий

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.  
**СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ:** Вместе с бытовым мусором.  
Соблюдения мер безопасности не требуется.  
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.  
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.  
Срок годности не установлен.  
Отпускается без рецепта.  
Изделие предназначено для многократного личного использования.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.