



ORTMANN®

DER ARZT FÜR IHRE FÜSSE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЛОСКИЕ ГЕЛЕВЫЕ
ВСТАВКИ
(ЗАЩИЩАЮЩИЕ)

MOLLI
Gel

Арт. F-00055-01B; 02B; 03B



Мягкие и комфортные межпальцевые вставки MOLLI изготовлены из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании гелевые вставки MOLLI помогают быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в межпальцевых промежутках при мозолях, потертостях, деформациях, лечении ушибов и воспалений суставов пальцев ног. Вставки MOLLI предназначены для многократного применения и идеально подходят для чувствительной кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Quintus varus (отклонение мясца внутрь);
- молоткообразные пальцы;
- мозоли межфаланговых суставов;
- трещины;
- потертости;
- повреждение кожи пальцев стопы;
- вросшие ногти;
- деформации суставов пальцев ног;
- ушибы суставов пальцев ног;
- артрозо-артриты и бурситы межфаланговых суставов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

идеально размещают между пальцами вырезом к пятке.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- разделяют принятые друг к другу пальцы;
- предотвращают трение, потертости, мозоли;
- эффективно смягчают кожу в области контакта с гелем.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

не использовать при открытых и мокнущих ранах.

СОСТАВ:

гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют размягчению мозолей.

УХОД:

вставки ежедневно мыть теплой водой с детским мылом, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, после чего пригладивают тальком или детской присыпкой.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

14 дней со дня продажи (на сохранение механических свойств).

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

2 шт. в упаковке.

РАЗМЕР:

S, M, L.



ORTMANN®

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

утилизация с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выделены.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Соблюдения мер безопасности не требуется. Отпускается без рецепта.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

изделия ORTMANN должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

СРОК ГОДНОСТИ:

не установлен.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.



Товар является медицинским изделием. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09970 от 21.06.2011 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия не ограничен. Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01711 (с 27.06.2014 г. по 26.06.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИ-МАШ».

Изготовитель: «ФРЕСНО ИНТЕРНЕШНЛ 2006, С.А.», Испания, Тейа (Барселона), Локал 13 08329, Полигано Индастриал Бувида, Индастриа 4.

Импортер: ООО «Орто Медикал Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Нрасногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИИНАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skil@nkamed.ru.